

Désinfectant de haut niveau pour les outils et les instruments PREempt™ HLD5

Désinfecte en 5 minutes sans aucune dilution requise et est réutilisable jusqu'à 14 jours.

PUISSANT

Tue les virus, les bactéries et les champignons sur les outils en seulement 5 MINUTES.

APPROUVÉ

Désinfectant de haut niveau homologué par Santé Canada. Instrument médical de classe II.

COMPATIBLE

Avec vos outils et instruments en acier inoxydable et en plastique dur professionnels.



PRATIQUE

Aucune dilution requise. Réutiliser jusqu'à 14 jours dans un bac de trempage¹.

DOUX

Pas de vapeurs ni de ventilation spéciale requise.

RESPONSABLE

Biodégradable. L'ingrédient actif se décompose en eau et en oxygène.

¹ La désinfection de haut niveau est recommandée pour les outils ou instruments semi-critiques qui entrent en contact avec les muqueuses ou la peau non intacte durant l'usage, mais qui ne pénètrent pas habituellement la peau ou les parties stériles du corps. Dans le contexte de services personnels, ceci peut comprendre des outils tels que des limes pour pieds réutilisables, des pinces utilisées pour les poils incarnés, les manches de microlames, les coupe-ongles et les pousse-cuticules ou les porte-aiguilles. Santé Canada est responsable du contrôle des revendications sur les étiquettes de désinfectant de haut niveau et a approuvé la réutilisation de PREempt™ HLD5 pendant 14 jours. Des exceptions à la règle de réemploi de 14 jours peuvent survenir si la solution est visiblement souillée ou si la bande d'essai indique une efficacité insuffisante de la solution. Dans ces cas, la solution devrait être jetée même si les 14 jours n'ont pas été atteints.

PREempt[®] HLD5

Désinfectant de haut niveau pour le retraitement d'outils et d'instruments alimenté par



PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES OUTILS

1

NETTOYER/RINCER/ SÉCHER

Nettoyer les outils avec de l'eau et du détergent. Rincer et sécher soigneusement.



2

REEMPLIR LE BAC DE TREMPE

Verser PREempt[™] HLD5 directement dans le bac de trempage. Ne pas diluer.



3

TREMPER LES OUTILS ET RÉUTILISER LA SOLUTION

Immerger complètement les outils dans le PREempt[™] HLD5 pendant 5 minutes seulement. Réutiliser la solution pendant un maximum de 14 jours.

La solution doit être jetée après 14 jours ou moins en fonction des résultats des bandes d'essai AHP2.



4

RINCER, SÉCHER ET RANGER

Rincer les outils à l'eau et les sécher manuellement au moyen d'un linge propre ou d'un chiffon jetable. Ranger les outils dans un contenant propre sur lequel il est inscrit « DÉSINFECTÉ ».



MEILLEURES PRATIQUES

La désinfection des outils devrait se faire après chaque service afin d'empêcher la propagation des germes et de l'infection.

Trempez vos outils pendant 5 minutes seulement. Ne laissez pas tremper les outils toute la nuit.

Utilisez uniquement des outils professionnels en acier inoxydable et en plastique dur de qualité supérieure pour éviter des problèmes de compatibilité*.

Avisez vos clients que les outils que vous utilisez ont été adéquatement nettoyés et désinfectés.

Désinfectez uniquement les outils réutilisables et assurez-vous de l'élimination appropriée des outils à usage unique.

UTILISER AVEC

- Coupe-ongles
- Pinces à ongles
- Pousse-cuticules
- Tire-comédons
- Limes pour pieds réutilisables
- Limes pour ongles réutilisables
- Mèches pour limes
- Pinces

* Vous devriez privilégier les fabricants qui fournissent des instructions d'utilisation (IDU) avec leurs outils et instruments.

Pour de plus amples renseignements, visitez : ViroxProBeauty.ca